

Información para Pedidos

Óptica Desechable InnerVue™/
Kit de juego de Cánula

922141

Kit de Procedimiento

922130

Kit de Procedimiento
con bata para el cirujano

922131



Procedimiento

InnerVue® y Diagnostics® son marcas registradas de Arthrotek, Inc.
Microban® es una marca registrada de Productos Surco, Inc.
Steri-Strip® y DuraPrep® son marcas registradas de la Compañía Minnesota Mining & Mfg.
Coverlet® es una marca registrada de la Compañía de Beiersdorf Aktiengesellschaft.

ARTHROTEK®
A BIOMET COMPANY

P.O. Box 587, Warsaw, IN 46581-0587 • 800.348.9500 ext. 1501 • ©2005 Arthrotek, Inc. Todos los Derechos Reservados.
Sitio web: www.arthrotek.com • Mail: arthrotek@arthrotek.com
Folleto No. Y-BMT-939/101505/K

INVENTING THE FUTURE OF ARTHROSCOPY

ARTHROTEK®
A BIOMET COMPANY




Contenido del Kit de Procedimiento



Procedimiento Sugerido

Preparación Pre-Estéril

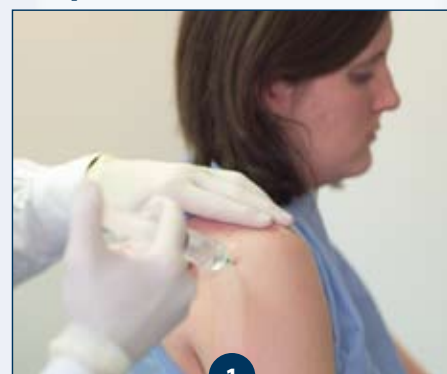

1 Ponga al paciente en una posición cómoda y relajada. Inyecte anestesia local dentro de la articulación.




2 Abra el kit de óptica desechable de 1.2mm Innervue y busque el CD de procedimiento del paciente e insertelo en el CD-Drive. No abra la óptica desechable aún.



3 Siga el indicador para colocar a un paciente en el sistema.

Preparación Estéril

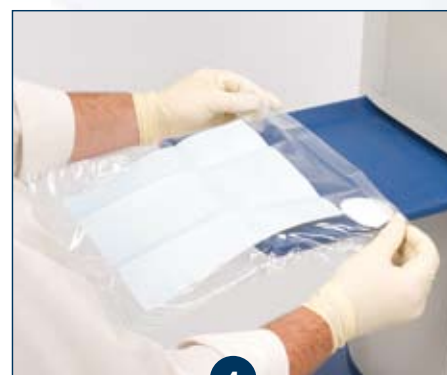

4 Abra el kit de Procedimiento Innervue (todos los elementos del kit deben ser abiertos usando técnica estéril). Cubra la superficie de trabajo extraíble con el campo clínico Innervue



5 Prepare en el paciente el sitio de inserción de la óptica con la solución quirúrgica DuraPrep.




6 Cubra el sitio quirúrgico con el cobertor del paciente Innervue.




7 Abra la canula reutilizable esterilizada y pongala en la superficie de trabajo extraíble




8 Retire la óptica desechable del kit y ubique la marca plateada en ella y la marca roja en la pieza de mano.

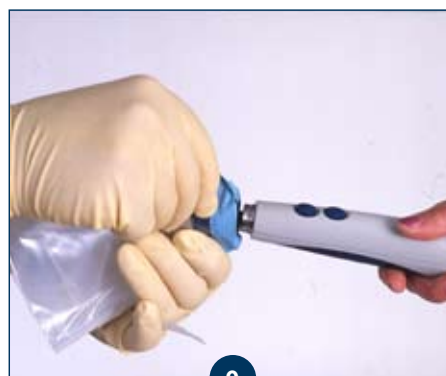

9 Alineando la marca plateada y la roja, apriete la óptica hacia la pieza de mano hasta que haga "click".

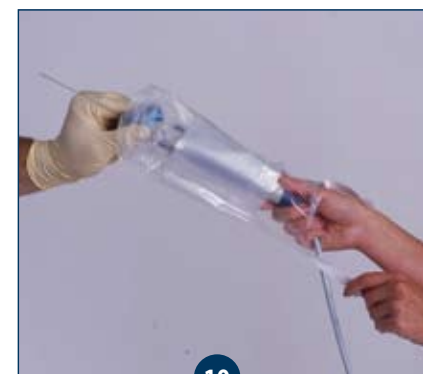


10 Tire la cubierta estéril hacia abajo sobre la pieza de mano y el cable.

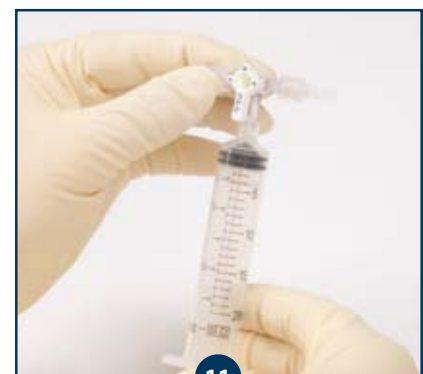

11 Conecte la jeringa de 20ml a la salida del medio de la llave de tres vías.



12 Conecte la tubería de 72" a uno de los brazos de la llave de tres vías. No tocar el fluido suministrado en el extremo de la tubería de 72" por personal no estéril.

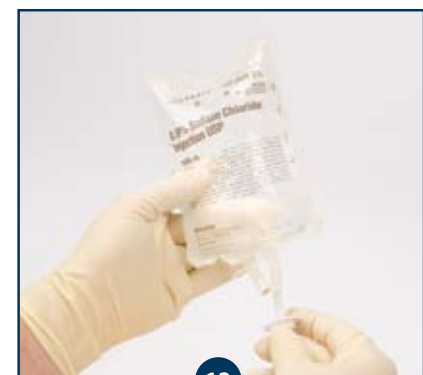


13 Una persona no estéril manipulará una bolsa con solución salina e insertará la bolsa en la tubería de 72". Cierre la tubería para prevenir un flujo no deseado.




14 Conecte la tubería de 48" al brazo remanente de la llave de tres vías.




15 Conecte el otro extremo de la tubería de 48" a la camisa de la óptica. La tubería y los componentes pueden ser colocados en la tabla de trabajo extraíble cubierta hasta que los necesite.

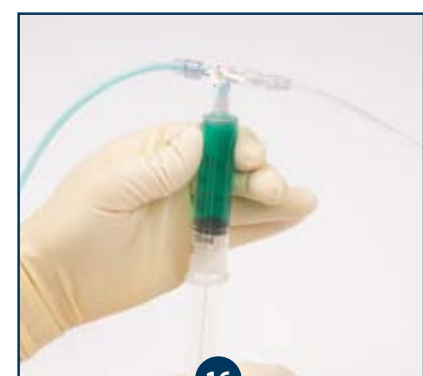

16 Gire la llave de tres vías hasta que la cánula este apagada y rellene la jeringa.

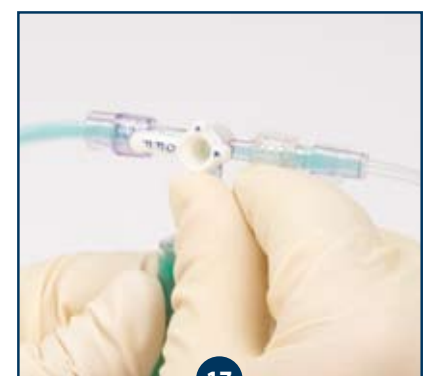

17 Gire la llave de tal modo que la bolsa de solución salina esté "off" y enjuague. Si la visualización baja de calidad por la sangre u otras sustancias en la articulación, use la jeringa para meter más fluido en la articulación.

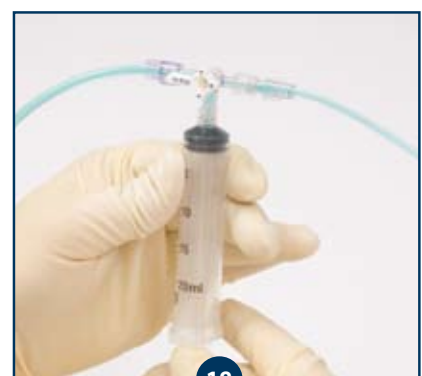

18 Use la llave de tres vías para rellenar la jeringa todo lo que sea necesario. Evite la sobrepresión en la articulación.